

الرجاء وضع رقم التسجيل السابق (موجود في أعلى بطاقة النتائج
على اليسار)
- الكشف النوعي: الكشف الكمي:

المستشفى:.....
المخبر:.....
الهاتف:.....

جذاذة فنية حول أخذ عينة الدم ونقلها لـ:

- الاختيار النوعي لفيروس السيدا: (PCR qualitative)
- الاختيار الكمي لفيروس السيدا : (P CR quantitative)
(الحمولة الفيروسيّة)

- تؤخذ عينة بـ 5-7 مل بالنسبة لكل اختبار في أنبوب معقم يحمل مادة EDTA أو مادة ACD عند الاقتضاء كمضاد للتخثر.
- حذار! مادة الهيبارين héparine لا تناسب هذين الاختبارين.
- يجب نقل العينة في ظروف حرارة ما بين 2 و 25 درجة سلسوس وإيصالها إلى المخبر صباحا في أجل لا يتجاوز خمس (5) ساعات على وقت أخذها.

التعريف بالمريض :	الاسم:	اللقب:
تاريخ الولادة (أو السن):	مكانها:.....
المستشفى:	القسم:.....
رقم التسجيل:	رقم الملف الطبي:.....

- الاختبار المطلوب: كشف نوعي عن الأ.د.ن (AND - VIH 1) على اللمفوسيت /
- ولید لأم حامله للفيروس /
 - اختبار مصلي للفيروس غير محدد /
 - احتمال إصابة أولية بالعدوى /

الاختبار المطلوب: كشف كمي (ARN - VIH 1) /

- الحالة السريرية:
- آخر نسبة لخلايا CD 4 : تاريخها: / / /
- علاج ثلاثي مضاد لفيروس السيدا: نعم / لا /
- تاريخ بداية العلاج: / / /
- الأدوية المستعملة:
- التزام المريض بالعلاج: جيد جدا / جيد / متوسط / دون المتوسط /
- تاريخ إيقاف العلاج عند الحدوث: / / /

– تاريخ أخذ العينة: / /

دقيقة

الساعة: س

– اسم الطبيب الطالب للاختبار:

الإمضاء

ملاحظة: مرجع الأنبوب لأخذ العينة : VENOJECT VP-050 STK

(أنبوب معقم حامل لمادة EDTA) + إبرة MU 2138 M